

BRUKERVEILDNING KRYKKE MED FJÆRING



Slik ser krykken ut med "innmat". Det er to klips på denne varianten i motsetning til vanlige krykker, som kun har en klips.

Den øverste klipsen skal alltid sitte i hullet over fjæra. Det er den som stopper der høyden stilles inn. Husk at fjæren alltid står litt i spenn uansett om du bruker krykkene som faste eller med fjærende egenskap.

Så for å regulere krykken til din høyde, gjør du følgende:

Sett krykken i gulvet og dytt litt ned. Da blir det enkelt å ta ut den nederste klipsen. Indre rør kan nå reguleres til riktig lengde.

Ta ut den øverste klipsen og sett den i hullet over fjæren, når krykken har den lengden du ønsker. Da har du to valg for å låse fast lengden.

Vi har nå satt den øverste klipsen inn i hullet, og dyttet fjæren helt opptil.

Ser vi på bilde 1 og indre rør kan vi se et avlangt spor og et rundt hull. Det er her du velger om du vil bruke krykkene med fjæring eller som faste krykker.

For å sette inn klipsen igjen må du igjen sette krykken i gulvet å dytte litt ned. Setter du klipsen inn i hull nr. 2 kommer klipsen i det avlange sporet og krykken blir fjærende. Setter du klipsen inn i hull nr. 3 vil klipsen treffe det runde hullet og krykken blir fast.

Så er det bare å regulere likt på begge krykkene og du har et par. Enten faste eller med fjærende egenskap.



Her på bilde nr. 3 ser vi klipsen festet i hullet for fast krykke. Trikset er å dytte fjæren litt sammen slik at klipsen blir lett å sette på. Dette gjelder om du vil ha enten fast eller fjærende egenskap på krykken.

Vi leverer fjærende krykker med anatomisk soft grep og med anatomisk grep i tre. Begge grep kan tilpasses i vinkel ved å løsne på skrue i håndtaket.

Mange bevegelige deler gir større slitasje ved hyppig bruk. Vi har derfor reservedeler til disse krykkene. Kan bestilles i nettbutikk eller på mail.